

GEBRUIKSAANWIJZING AFNAMESET

HOE DOE IK DE STOELGANGTEST?

Volg deze gebruiksaanwijzing stap voor stap. Zo neem je zeker op de juiste manier deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Voor een filmpje over hoe je een staal neemt, surf je naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek. Hou de afnameset buiten het bereik van kinderen.



STAP 1: Open de bubbel-envelop en neem de inhoud eruit. Dit zit erin:

- een groene zakje met een flesje (iFOB-test), absorptiepapier (rechthoekig doekje) en productinformatie;
- opvangpapier (wit papier met groene tekeningen).

Let op: bewaar de test op kamertemperatuur tot je hem gebruikt. Nadat je de test hebt gedaan bewaar je het flesje in de koelkast maar niet langer dan zeven dagen. Stuur het staal zo snel mogelijk op. Gebruik de test voor de vervaldatum die erop vermeld staat. 📧 (xxxx/2018/03)



STAP 2: Neem het groene zakje en het opvangpapier mee naar het toilet. Plas en spoel door.



STAP 3: Leg het opvangpapier met de tekeningen naar boven op het water in de toiletpot.



STAP 4: Het opvangpapier vangt je stoelgang op. Neem onmiddellijk een staal.

Haal het flesje uit het groene zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten.

Draai aan de groene dop en open het flesje. **Giet de vloeistof NIET weg.** Voeg ook geen vloeistof toe.



STAP 5: Aan de groene dop zit een staafje met groefjes. Strijk met de groefjes over het oppervlak van je stoelgang tot er stoelgang aan kleeft. Meer stoelgang is niet nodig.



STAP 6: Steek de dop met het staafje terug in het flesje. Druk op de dop tot je een klik hoort.

Let op: schrijf niets op het flesje en doe het ook niet meer open!



STAP 7: Steek het flesje in het groene zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten. Sluit het zakje.

Spoel het opvangpapier samen met je stoelgang door. Het papier is biologisch afbreekbaar.



STAP 8: Vul het deelnameformulier in. Controleer ook de gegevens van je (huis)arts. Verbeter of vul aan indien nodig.

Let op: zonder een correct ingevuld deelnameformulier zul je het resultaat van je test niet ontvangen!



STAP 9: Steek het groene zakje en het deelnameformulier samen in de bubbel-envelop. Op die envelop staat het adres van het labo.



STAP 10: Stuur de bubbel-envelop zo snel mogelijk op. Een postzegel is niet nodig.

Kun je je staal niet meteen versturen? Bewaar het flesje dan in de koelkast. Hoogstens zeven dagen.

BEVOLKINGS
ONDERZOEK
DIKKEDARM
KANKER

WAT GEBEURT ER MET
MIJN STAAL?

Het labo test het staal van je stoelgang op de aanwezigheid van bloed. Binnen de 14 dagen ontvangen jij en je (huis)arts dan het resultaat. Dat krijg je altijd, dus ook als alles oké is.